

Sterilmax®

Antiséptico - Solución Concentrada

STERILMAX® es un potente bactericida, virucida, fungicida y esporicida, efectivo contra las cepas más resistentes. Su acción bactericida es efectiva en menos de 60 segundos, mientras que su función esporicida se realiza en 15 minutos. STERILMAX® es óptimo para realizar desinfección y esterilización de instrumentos, equipos y ambientes hospitalarios, en lugares tan críticos como quirófanos y unidades neonatales.

Entre los usos más recomendados de STERILMAX® está la desinfección del aire por rociado o nebulización, con la que se consigue una distribución ideal en todo el ambiente dentro del alcance. Para ello sugerimos algunas recomendaciones:

- Debe asegurarse que la superficie o área a desinfectar haya sido previamente limpiada (mecánicamente).
 - Prepare una dilución al 30% (300 ml de STERILMAX® en cada litro de solución).
 - Prepare una dilución al 10% (100 ml de STERILMAX® en cada litro de solución).
- Puede rociar la mezcla sobre las superficies o nebulizar en la sala, procurando la humectación completa de las superficies y el suelo.
 - Las piezas con geometrías complejas y cavidades pueden sumergirse en la solución. Los tubos y mangueras también se pueden lavar fácilmente con la solución.
- Deje actuar de 15 a 40 minutos atendiendo al grado de contaminación, según la tabla de actividad bactericida.
- Transcurrido el tiempo de espera, deben ENJUAGARSE solamente las partes metálicas con agua potable o una solución de 1cc de STERILMAX® por galón de agua.
- Para mantener la desinfección, los pisos se limpiarán utilizando 30% STERILMAX® - 70% agua limpia.
- Para mantener la desinfección de superficies no hospitalarias se limpiarán utilizando 10% STERILMAX® - 90% agua limpia.