

INSTRUCCIONES PARA EL USO - USOS ESPECIFICOS

Concentración del desinfectante	AREA	USOS ESPECIFICOS	Tiempo de contacto minutos(*)
0.0105% 1.5% 2.0% 5.0% 10.0%	HIGIENE GENERAL	Desinfección para la potabilización del agua Lavado antiséptico para los alimentos Irrigaciones quirúrgicas (fascitis necrotizante) Higiene detal-bucal-faringea y nasal Desinfectante de las manos del personal hospitalario	5 a 15` 5 a 15` 5 a 15` 5 a 15` 5 a 15`
3% 3% 5% 1% 3% 5%	NEFROLOGIA	Desinfección del aparato de hemodiálisis Desinfección de los circuitos e instalaciones Esterilización RAPIDA filtros de hemodiálisis Esterilización LENTA filtros de hemodiálisis Antisepsia área de fistula arteriovenosa Cura de las infecciones del antebrazo con empaques	5` 5` 5` a 1 hora 24 horas 3 a 15` 5 a 15`
30%	EPIDEMIOLOGIA	Fumigaciones de ambientes (aerosol o evaporizador)	15 a 40`
2% 5% 10% 10% 10%	CIRUGIA	Lavados peritoneales Tratamiento de la piel intacta Desinfección del capo quirúrgico Desinfección de las manos del cirujano Esterilización del instrumental quirúrgico Curas de heridas quirúrgicas	5 a 15` 5` 5 a 15` 5 a 15` 5 a 15` 5 a 15`
10%	ENDOSCOPIA	Esterilización de materiales e instrumentos	5 a 15`
5% 5% 3%	DERMATOLOGIA	Cura de las quemaduras Cura de úlceras por decúbito y piodermitis Tratamiento de baño con compresas	5 a 15` 5 a 15` 15 a 30`
5% 5% 10%	GINECOLOGIA	Higiene íntima Asistencia a parto Curas del área de episiorrafia	Lavados Lavados 5 a 15`


ITAL FARM

Sterilmax® TABLA DE CONCENTRACIONES

Para mayor comodidad use el medidor de porcentajes provisto junto al producto concentrado

0.0105%


8 gotas de Sterilmax® por cada galón de agua



Con 1 galón Sterilmax® se obtienen **9,464 galones** de agua purificada

1%


38 cc de Sterilmax® por cada galón de agua



Con 1 galón Sterilmax® se obtienen **95 galones** de solución al 1%

1.5%


57 cc de Sterilmax® por cada galón de agua



Con 1 galón Sterilmax® se obtienen **63 galones** de solución al 1.5%

2%


80 cc de Sterilmax® por cada galón de agua



Con 1 galón Sterilmax® se obtienen **47 galones** de solución al 2%

3%


113 cc de Sterilmax® por cada galón de agua



Con 1 galón Sterilmax® se obtienen **32 galones** de solución al 3%

5%


190 cc de Sterilmax® por cada galón de agua



Con 1 galón Sterilmax® se obtienen **20 galones** de solución al 5%

10%


380 cc de Sterilmax® por cada galón de agua



Con 1 galón Sterilmax® se obtienen **10 galones** de solución al 10%

30%

1,130 cc de Sterilmax® por cada galón de agua **ó** 1 porción de Sterilmax® + 2 porciones de agua

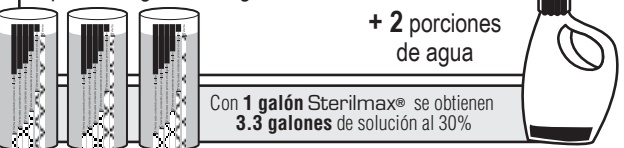

Con 1 galón Sterilmax® se obtienen **3.3 galones** de solución al 30%

Al preparar la solución de Sterilmax® con el agua:

1. Vierta Sterilmax® primero y luego el agua.
2. No rebose el envase.
3. Mantenga las medidas lo más exactas posibles.

Nota: Sólo prepare la cantidad suficiente para ser utilizada dentro de las 24 horas de su combinación.